

Hygieniaopas

HEKA

Hygieeniseksi suunniteltu

Heka S+ on suunniteltu mahdollisimman hygieeniseksi ja helpoksi puhdistaa. Se sisältää tarkkaan harkittuja yksityiskohtia, kuten kovan ja sileän karkaistun lasipinnan, joka on erityisen helppo puhdistaa ja desinfioida. Sisäänrakennetun kosketusnäytön ansiosta yksikössä ei ole painikkeita/vipuja, jotka keräisivät pölyä ja likaa.

Yleinen pintojen puhdistus


Kaikki yksikön pinnat ovat joko jauhemaalattua alumiinia tai karkaistua lasia. Näyttö voidaan tietenkin lukita puhdistuksen ajaksi. Se avautuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua lukitsemisesta, minkä jälkeen yksikkö on valmis käyttöön seuraavaa potilasta varten. Kaikki kosketuspinnat - kädensijat ja instrumenttituki - on helppo irrottaa puhdistusta ja autoklaavausta varten. Tämä koskee myös OP-lampun kädensijoja.



Automaattinen instrumenttien huuhtelu

Yksikön vesijärjestelmän ja instrumenttiletken tehokas huuhtelu on tärkeää, jotta yksikköön ei jää biofilmejä.

Automaattinen instrumenttien huuhtelu tekee instrumenttien letkujen päivittäisestä huuhtelusta helpoa potilaiden välillä - kaikki käy nopeasti ja tehokkaasti. Sylkyastian huuhtelun aktivointi on helppoa instrumentti-huuhtelun jälkeen.

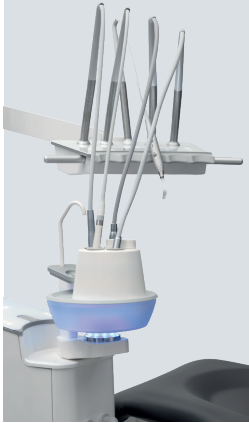

Imupuhdistusjärjestelmä

Automatisoidussa imujärjestelmässä imuletkun päässä oleva suutin aktivoituu ja puhdistaa jatkuvasti imujärjestelmää kemikaaleilla tai puhtaalla vedellä. Siten se pitää koko imujärjestelmän puhtana ja tehokkaana.

Kemikaali- tai vesihuuhtelu voidaan aktiivisesti käyttää potilaan kanssa työskennellessä. Tämä varmistaa kaikkien epäpuhtauksien tehokkaan poiston ja estää samalla letkun kuivumisen, jotta epäpuhtaudet eivät kiinnity letkun sisäpinnalle.

Säännöllinen huuhtelu aktiivisilla kemikaaleilla potilaiden välissä tai päivän päätteeksi varmistaa, että pesäkkeitä muodostavat yksiköiden, pieneliöiden ja bakteerien määrä vähenee imujärjestelmässä.



Sylkyastia / sylkyventtiili / mahdollinen amalgaamien erottaja

Varmistaa veden tehokkaan virtauksen sylkyjärjestelmästä. Amalgaamien erottaja poistaa amalgaamin myös sylkyvedestä.



Sylkyastia voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.



Aktiivinen vesipuhdistus

Jos aktiivinen vesipuhdistus valitaan, yksikön vesijärjestelmään syötetään jatkuvasti aktiivista puhdistusnestettä bakteerien määrän vähentämiseksi ja biofilmin muodostumisen ehkäisemiseksi. Vesipuhdistusjärjestelmä on saatavilla kahdena versiona: DVGW:n hyväksymällä vesiaukolla tai ilman sitä.



Yksikön puhdistus


Aamulla

- Instrumenttien huuhtelu automaattisella instrumenttihuuhtelulla - pitkä ohjelma
- Imujärjestelmän huuhtelu käyttäen automaattista imujärjestelmän puhdistusta (tai imemällä puhdistusneste sisään).



Ennen jokaista potilasta

- Pintojen ja instrumenttiletkujen puhdistus ja desinfiointi, mukaan lukien kädensijat ja tuolin verhoilu
- Lyhyt instrumenttien huuhtelu automaattisella instrumenttihuuhtelulla
- Imujärjestelmän sisäinen desinfiointi huuhtelemalla se aktiivisilla kemikaaleilla - imujärjestelmän käsiasat puhdistetaan ja pyyhitään hyväksytyllä desinfiointiaineella.

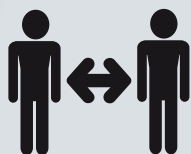

Ilta

- Imujärjestelmän huuhtelu aktiivisilla kemikaaleilla. Imujärjestelmän käsiasat poistetaan ja puhdistetaan klinikan säännösten mukaan.
- Imuletkujen suodattimien tarkistus ja puhdistus
- Kädensijojen ja instrumenttien irrotus - puhdistus ja autoklaavaus klinikan säännösten mukaan.



Muu (tarvittaessa)

- Tarkistus ja tarvittaessa imujärjestelmän kemikaali- tai vesikäsittelyn toisto
- Sylkyventtiilin/poistovesisuodattimen tarkistus ja tarvittaessa puhdistus
- Amalgamisäiliön vaihto, jos se on täynnä.



Nämä ovat yleiset ohjeet. Yksikkö on tietenkin aina puhdistettava voimassa olevien ohjeiden mukaan.

Tutustu myös käyttöoppaaseen KA-0111, joka sisältää yksityiskohtaisia ohjeita Heka S⁺-yksikön puhdistamisesta.

HEKA