

Gids voor een goede hygiëne

HEKA

Hygiënisch ontworpen

De Heka S+ is zo ontworpen dat deze zo hygiënisch en eenvoudig mogelijk te reinigen is. Het systeem omvat doordachte details, zoals een oppervlak van gehard glas dat zeer glad en hard is en daardoor bijzonder effectief is om te reinigen en te desinfecteren.

Dankzij het geïntegreerde touch-display zijn er geen knoppen of schakelaars die stof en vuil kunnen opvangen.

Algemene reiniging van de oppervlakken

Alle oppervlakken van de unit zijn van gepoedercoat aluminium of gehard glas.

Het display kan tijdens het reinigen natuurlijk worden vergrendeld en wordt na 2 minuten automatisch ontgrendeld, zodat de unit weer klaar is voor de volgende patiënt.

Alle contactpunten, zoals handgrepen en instrumenthouders, kunnen eenvoudig worden verwijderd om te reinigen en autoclavieren. Dit geldt ook voor de handgrepen van de operatielamp.



Automatische instrumentenspoeling

Een effectieve spoeling van het watersysteem en de instrumentenlangen van de unit is een belangrijke factor om de unit vrij te houden van biofilms. Dankzij de

automatische instrumentenspoeling is het makkelijk om de instrumentenlangen dagelijks en tussen twee patiënten in te spoelen - snel en efficiënt. De spittoenspoeling kan makkelijk worden geactiveerd na de instrumentenspoeling om ook dit deel van het watersysteem te spoelen.



Zuigstelsysteem voor reiniging

Tijdens de automatische afzuiging wordt aan het einde van de afzuigslangen een mondstuk geactiveerd dat het afzuigstelsysteem continu reinigt met chemicaliën of gewoon schoon water, en helpt om het hele afzuigstelsysteem hygiënisch en efficiënt te houden. Het is mogelijk om tijdens het behandelen van patiënten te kiezen tussen spoelen met chemicaliën of alleen met water.

Dit zorgt voor een effectieve verwijdering van alle onzuiverheden zonder dat de slang uitdroogt en voorkomt dat de onzuiverheden aan de binnenkant van de slang stollen.

Regelmatig spoelen met actieve chemicaliën tussen twee patiënten in of 's avonds kan ervoor zorgen dat het aantal kolonievormende eenheden, ziektekiemen en bacteriën in het afzuigstelsysteem wordt verminderd.



Spittoonschaal / spittoonklep / potentiële amalgaamafscheider

Zorgt voor een effectieve waterstroom uit het spittoonsysteem. Een amalgaamafscheider verwijdert ook amalgaam uit het spitoonwater.

De spitoon kan eenvoudig worden verwijderd om schoon te maken.



Actieve waterzuivering

Als er voor actieve waterzuivering wordt gekozen, wordt continu actieve reinigingsvloeistof afgegeven in het watersysteem van de unit om het aantal bacteriën te verminderen en bio-

filmvorming te voorkomen.

Het waterzuiveringssysteem is verkrijgbaar in twee varianten, met of zonder DVGW-goedgekeurde terugstromingsbeveiliging.



Routine voor reiniging van de unit


's Ochtends

- Instrumenten spoelen met automatische instrumentenspoeling - lang programma
- Afzuigstelsel spoelen met automatische zuigreiniging (of door reinigingsvloeistof op te zuigen)



Vóór elke's patiënt

- Oppervlakken en instrumentenslangen reinigen en desinfecteren, inclusief handgrepen en stoelbekleding
- Instrumenten kort spoelen met behulp van de automatische instrumentenspoeling
- Afzuigstelsel spoelen met actieve chemicaliën om intern te desinfecteren - handgrepen van afzuigstelsel reinigen en afvegen met een goedgekeurd ontsmettingsmiddel

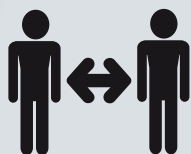


Avonds

- Afzuigstelsel spoelen met actieve chemicaliën. Handgrepen van het afzuigstelsel verwijderen en reinigen volgens de richtlijnen van de kliniek.
- De filters in de afzuigslangen controleren en reinigen
- Handgrepen en instrumenthouder verwijderen - reinigen en autoclavieren volgens de richtlijnen van de praktijk



Overig (indien nodig)

- Chemicaliën voor de zuigreiniging en/of actieve waterzuivering controleren en opnieuw aanbrengen
- Spittoonklep/afvoerfilter controleren en indien nodig reinigen
- De amalgaambak vervangen als deze vol is

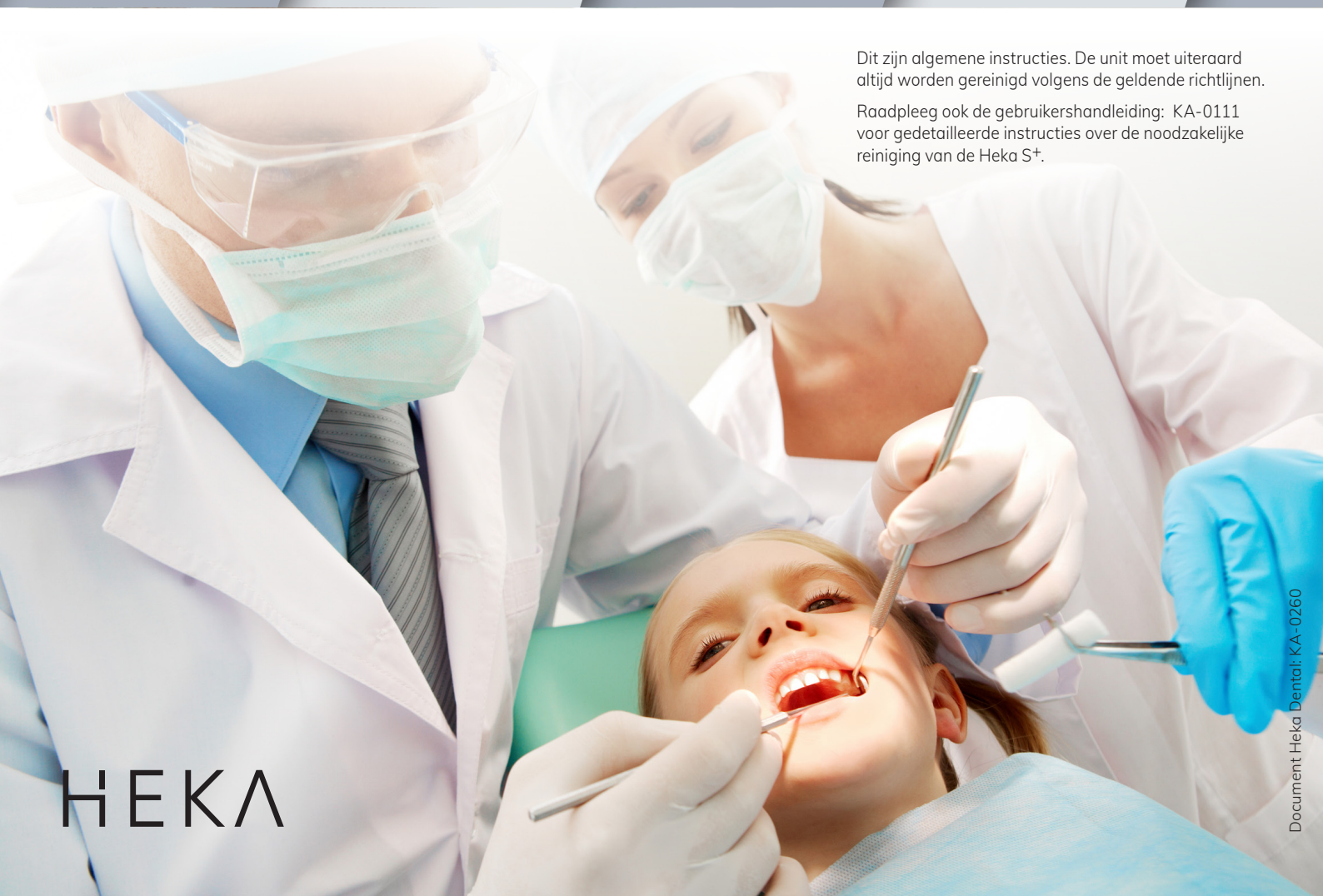

Dit zijn algemene instructies. De unit moet uiteraard altijd worden gereinigd volgens de geldende richtlijnen.

Raadpleeg ook de gebruikershandleiding: KA-0111 voor gedetailleerde instructies over de noodzakelijke reiniging van de Heka S⁺.