

Hygieneveiledning

HEKA

Utviklet for hygiene

Heka S+ er utviklet for å være så hygienisk og enkel å rengjøre som mulig. Den har gjennomtenkte detaljer, som den harde og glatte overflaten av herdet glass, som rengjøres og desinfiseres svært effektivt.

Med den integrerte trykkskjermen er det ingen knapper eller brytere som kan samle støv og smuss.

Generell overflate-rengjøring

Alle overflatene på enheten er enten pulverlakkert aluminium eller herdet glass. Skjermen kan naturligvis låses under rengjøring, og låses automatisk opp etter to minutter, slik at enheten er klar igjen før neste pasient.

Alle kontaktpunkter - håndtak og instrumentstøtte - kan enkelt tas av for rengjøring og autoklaving. Dette omfatter også håndtakene for operasjonslampen.



Automatisk instrumentskylling

Effektiv skylling av enhetens vannsystem og instrumentslanger er en viktig faktor for å holde enheten fri for biofilm.

Automatisk instrumentskylling gjør det enkelt å skylle instrumentslanger daglig og mellom pasienter - raskt og effektivt.

Det er enkelt å aktivere fontene-skylling etter instrumentskylling for også å skylle denne delen av vannsystemet.



System for rengjøring av sug

Med det automatiske suget aktiveres en dyse i enden av sugeslangene som kontinuerlig rengjør sugesystemet med kjemikalier eller bare rent vann, og bidrar til å holde hele sugesystemet rent og effektivt.

Det er mulig å aktivere skylling med kjemikalier eller bare vann under arbeid med en pasient.

Dette sikrer at alle urenheter effektivt fjernes uten at slangen blir tørr og urenheterne størkner på innsiden av slangen.

Regelmessig skylling med aktive kjemikalier mellom pasienter, eller om kvelden kan sikre at kolonidannende enheter og bakterier i sugesystemet reduseres.



Fonteneskål / fonteneventil / eventuelt amalgamutskiller

Sikrer effektiv vannstrøm fra fontene-systemet. En amalgamutskiller fjerner også amalgam fra fontenevannet.

Fonteneskålen kan enkelt demonteres for rengjøring.



Aktiv vannrensing

Hvis aktiv vannrensing er valgt, doseres aktiv rensesvæske kontinuerlig til enhetens vannsystem

for å holde kimtallet nede og hindre dannelse av biofilm.

Vannrensesystemet er tilgjengelig i to varianter, med eller uten DVGW-godkjent vannspalte.



Rutiner for rengjøring av enheten


Morgen

- Skyll instrumentene med automatisk instrumentskylling - langt program
- Skyll sugesystemet med automatisk rengjøring av sug (eller ved å suge inn rensesvæske).



Før hver pasient

- Rengjøring og desinfeksjon av overflater og instrumentslanger, inkl. håndtak og stoltrekk
- Kort skylling av instrumenter med automatisk instrumentskylling
- Skylling av sugesystem med aktive kjemikalier for å desinfisere det innvendig - sugehåndstykker rengjøres og tørkes med godkjent desinfeksjonsmiddel.

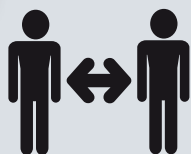

Kveld

- Skyll sugesystemet med aktive kjemikalier. Sugehåndstykkene tas av og rengjøres i samsvar med klinikkens retningslinjer
- Kontroller og rengjør filtrene i sugeslangene
- Ta av håndtak og instrumentstøtte - rengjør og autoklaver i samsvar med klinikkens retningslinjer.



Annet (Ved behov)

- Kontroller og tilsett kjemikalier på nytt om nødvendig for rengjøring av sug og/eller aktiv vannrensing
- Kontroller fonteneventilen/avløpsfilteret, og rengjør om nødvendig
- Bytt amalgambeholderen hvis den er fylt.



Dette er generelle anvisninger. Enheten må naturligvis alltid rengjøres i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Se også brukerhåndbok: KA-0111 for mer informasjon om nødvendig rengjøring av Heka S⁺.

HEKA